

BERDSEN

BL-900

BL-907



Ručná odsávačka mlieka

SK

Návod na použitie

Pred montážou a použitím si prečítajte návod a postupujte podľa pokynov.
Návod si uchovajte pre budúce použitie.

5900 / 5907 / v.1.4

www.berdsen.pl

Úvod

Materské mlieko je najzdravšia a najprirodzenejšia strava pre novorodencov a dojčatá, nevyhnutná pre ich správny rast a vývoj. Obsahuje protilátky, ktoré chránia vaše dieťa pred infekciami a alergiami. Materské mlieko sa odporúča ako jediná strava pre dieťa počas prvých 6 mesiacov života.

Po 6 mesiacoch by sa malo kombinovať s pevnou stravou.

DÔLEŽITÉ! Odsávačka mlieka nie je určená na odsávanie mlieka, keď hladné dieťa nedokáže samo vyprázdniť prsník, t. j. vo všetkých prípadoch, keď dochádza k upchatiu mliekovodov.

Odsávačka mlieka pomáha odsávať prebytočné mlieko z prsníka. Stimuluje tiež prirodzený proces sania dieťaťa. Ak máte problémy s prirodzeným kojením alebo pociťujete bolesť počas kŕmenia, pred použitím odsávačky mlieka sa poraďte so svojím lekárom.

Odsávačka mlieka je osobným vybavením a nemala by sa zdieľať ani požívať iným osobám. Používanie viac ako jednou osobou môže predstavovať zdravotné riziko.

Tieto pokyny je nutné prísne dodržiavať. Používanie výrobku v rozpore s jeho určeným účelom a týmito pokynmi môže predstavovať riziko pre používateľa a môže poškodiť výrobok. Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním výrobku nemôže byť dôvodom na reklamáciu.



Upozornenia!

- Odsávačku mlieka používajte iba na účely, na ktoré je určená, ako je uvedené v týchto pokynoch.
- Odporúča sa, aby bola odsávačka mlieka po prvýkrát použitá pod dohľadom odborníka a aby boli dodržané odporúčania lekára alebo laktáčnej poradkyne.
- Je dôležité správne nastaviť silu odsávania. Príliš slabé odsávanie môže mať za následok menšie množstvo odsávaného mlieka, zatiaľ čo príliš silné odsávanie môže spôsobiť bolestivý proces odsávania a znížiť množstvo mlieka.
- Nesprávna sila odsávania a nesprávne používanie odsávačky mlieka môže spôsobiť bolesť prsníkov alebo poranenie.
- Ak pocítite nepohodlie v prsiach alebo bradavkách, prestaňte odsávačku používať a okamžite sa poraďte so svojím lekárom.
- Na vyvolanie laktácie nepoužívajte odsávačku mlieka. Odsávačka mlieka je zariadenie určené na podporu laktácie (simulácia, odsávanie prebytočného mlieka alebo pomoc pri udržiavaní laktácie) alebo v prípadoch, keď je priame dojčenie nemožné alebo obtiažne.
- Pred použitím odsávačky si dôkladne umyte ruky.
- Po odsávaní mlieka odsávačku umyte. Uložené časti odsávačky by mali byť suché.
- Produkt vždy udržiavajte v čistote. Pri používaní produktu je nevyhnutné dodržiavať hygienu, aby bola zaistená bezpečnosť matky a dieťaťa.
- Zabráňte znečisteniu alebo zaprášeniu odsávačky mlieka. Mohlo by to ovplyvniť výkonnosť výrobku.

- Pred každým použitím výrobok umyte. Neužívajte zariadenie, ak nebolo umyté. Ak výrobok vykazuje viditeľné známky poškodenia, nepoužívajte ho.
- Montáž, demontáž a čistenie odsávačky mlieka musí vykonávať dospelá osoba.
- Odsávačku mlieka je potrebné montovať a demontovať v poradí uvedenom v návode. Pri demontáži a čistení odsávačky mlieka venujte pozornosť menším častiam, aby ste ich nestratili.
- Produkt nepoužívajte počas kúpania.
- Produkt nepoužívajte NA miestach vystavených vlhkosti, NAPR. v blízkosti umývadla, sprchy, umývadla alebo práčky, a nevystavujte produkt priamemu slnečnému žiareniu.
- Produkt uchováajte mimo dosahu dojčiat a malých detí.
- Produkt nehádzte ani ním neudierajte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Hneď po sterilizácii VO vriacej vode sa nedotýkajte odsávačky holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Ak na výrobku nie sú žiadne zvyšky iných MATERIÁLOV, JEHO ZÁPACH je normálny. Aby ste ho znížili, pred prvým použitím odsávačku dôkladne umyte podľa pokynov.
- V záujme bezpečnosti a zdravia vášho dieťaťa používajte tento výrobok vždy pod dohľadom dospelých. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru počas kŕmenia.
- Nikdy nepoužívajte cumlík na fľašu ako cumlík.
- Časté a dlhodobé sanie TEKUTÍN môže spôsobiť kazenie zubov.
- Pred podávaním jedla vždy skontrolujte jeho teplotu.
- Všetky nepoužité časti uchováajte mimo dosahu detí.
- Pri ohrievaní jedla v mikrovlnnej rúre buďte obzvlášť opatrní. Ohrievané produkty vždy premiešajte, aby sa teplo rovnomerne rozložilo, a pred podávaním skontrolujte teplotu. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Pred každým použitím skontrolujte cumlík. Potiahnite cumlík vo všetkých smeroch. Ak zistíte akékoľvek známky poškodenia, cumlík vyhoďte.
- Nevystavujte cumlík priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám. Vysoké teploty. Nechávajte cumlík v dezinfekčnom prostriedku dlhšie, ako je odporúčané, pretože to môže oslabiť produkt.
- Pred prvým a každým ďalším použitím umyte a dezinfikujte časti odsávačky podľa pokynov v návode.

Zoznam častí odsávačky





- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. uzáver | 6. podporný krúžok |
| 2. silikónový masážny uzáver | 7. rukoväť |
| 3. telo s lievikom | 8. obojstranný piesť |
| 4. montážny kryt | 9. 150 ml fľaša |
| 5. silikónový valec | |






Názov dielu	Teplotná odolnosť
Utesňovací uzáver	-20 °C/120 °C
silikónový masážny uzáver	-20 °C/200 °C
telo s lievikom	-20 °C/120 °C
montážny kryt	-20 °C/120 °C
silikónový valec	-20 °C/200 °C
podporný krúžok	-20 °C/120 °C
rukoväť	-20 °C/80 °C
otočná rukoväť	-20 °C/120 °C
150 ml fľaša	-20 °C/120 °C

Ako zostaviť odsávačku mlieka

1. Umiestnite valec (5) NA telo s lievikom (3).
2. Uistite sa, že je valec pevne pritlačený.
3. Umiestnite rukoväť na krúžok upevnený NA telese a pripevnite ju k čapu na telese.
4. Nasadte kryt a zaistite ho.
5. Nasadte masážnu čiapočku NA telo s lievikom.
6. Masážnu hlavicu pevne pritlačte na telo.
7. Nasadte fľašu na telo pomocou lievika.
8. Poloha, v akej treba držať odsávačku mlieka.
9. Stlačte rukoväť, aby ste odsali mlieko.

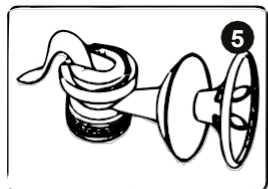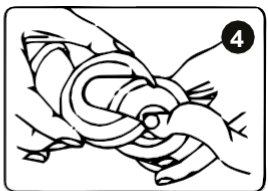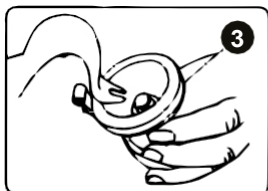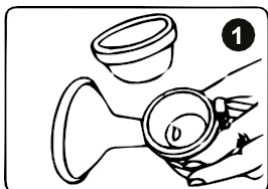

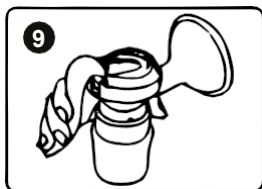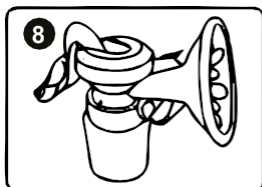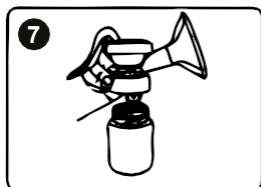

Pri odsávaní mlieka zachovajte správnu polohu



Ako používať

1. Sadnite si do pohodlnej polohy a relaxujte.
2. Priložte odsávačku na prsník tak, aby bradavka bola hlboko vo vnútri lievika.
3. Stlačte rukoväť smerom k fľaši, aby ste odsali mlieko.
4. Nezabudnite po použití dôkladne umyť a vysušiť všetky časti odsávačky.

Riešenie problémov

1. Uistite sa, že prsná miska je správne pripevnená k prsníku.
2. Skontrolujte, či sú masážny vankúšik, prsná miska, valec a rukoväť správne pripevnené.

Skladovanie a ohrievanie odsátého mlieka

- Odstriekané mlieko môžete skladovať v dobre uzatvorenej fľaši alebo v špeciálnych vreckách na skladovanie mlieka. Mlieko by malo byť umiestnené do mrazničky ihneď po odsávaní.
- Na zmrazenie mlieka by mala byť fľaša/vrecko naplnené na $\frac{3}{4}$ svojej kapacity.
- Fľašu/vrecko neumiestňujte na police mrazničky.
- Mrazte iba čerstvé mlieko.
- Mlieko možno uchovávať v chladničke 48 hodín a v mrazničke 3 mesiace.
- Mrazené potraviny by mali byť pred podaním ponechané v chladničke 12 hodín alebo rozmrazené pod tečúcou vlažnou vodou. Postupne zvyšujte teplotu vody, až kým nedosiahne teplotu, pri ktorej sa mlieko podáva dieťaťu. Potraviny z mrazničky by sa mali niekoľko minút zohrievať pod tečúcou teplou vodou alebo umiestniť do teplej kúpeľa.
- Rozmrazené mlieko by malo byť podané dieťaťu do 24 hodín.
- Mlieko nezohrievajte priamo na sporáku/varnom paneli. Nezohrievajte ho do bodu varu. Nevarte ho.
- Pred podaním potrastrajte nádobou, aby sa oddelené tukové častice zmiešali so zvyškom mlieka.
- Nikdy znovu nezamrazujte rozmrazené mlieko.
- Nezohrievajte potraviny v mikrovlnnej rúre, pretože to prispieva k strate prospešných vlastností potravín. Potraviny zohrievane v mikrovlnnej rúre môžu dieťa popáliť.
- Nemieste čerstvo odsaté mlieko s predtým zmrazeným mliekom.

Metódy čistenia a dezinfekcie

- Pred prvým a každým ďalším použitím umyte a dezinfikujte všetky časti odsávačky.
- Všetky časti umyte v teplej vode s čistiacim prostriedkom a potom opláchnite vodou.
- Na umývanie silikónových častí použite mäkkú špongiu/handričku z jemnej froté látky. POUŽITIE hrubých MATERIÁLOV môže spôsobiť trvalé poškodenie silikónových častí.
- Všetky časti odsávačky mlieka možno sterilizovať v elektrických sterilizátoroch.
- Ak nemáte profesionálny sterilizátor, vložte časti odsávačky mlieka na 5–10 minút do hrnca s vriacou vodou, aby sa dezinfikovali. Vyhnite sa nárazom častí odsávačky mlieka o dno hrnca, pretože by sa mohli poškodiť.

Vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 135B

81-571 Gdynia

Polsko

www.berdsen.pl